



PROTERMIA 2.0
SISTEMA DE DIATERMIA

RNTECH.ES

PROTERMIA 2.0

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN DIATERMIA

Protermia 2.0 se compone de un sistema monopolar resistivo y capacitivo, lo que permite trabajar tanto a nivel superficial, como en los tejidos más profundos.

Pudiendo alcanzar desde tejido dérmico, linfático, vascular, adiposo, hasta tejido muscular, tendinoso o a nivel articular.

Además, Protermia 2.0 trabaja con una frecuencia de 448k Hz, lo que asegura los efectos beneficiosos que produce su uso.

100% SEGUROS

OFRECE TRATAMIENTOS NO INVASIVOS

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS



ANTI-ARRUGAS



REAFIRMACIÓN



LUMINOSIDAD




ANTICELULÍTICO



TRATAMIENTOS FISIOTERAPIA




REGENERACIÓN TISULAR

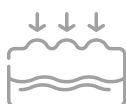

ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA



ACCIÓN ANALGÉSICA

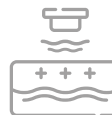

DRENAJE Y REABSORCIÓN



SOFTWARE

SENCILLO E INTUITIVO

Nuestro software ha sido diseñado pensando en la simplicidad y la eficiencia. Con una interfaz intuitiva, podrás navegar fácilmente por todas las funciones y ajustes, sin complicaciones y sin comprometer su funcionalidad.

APAGADO AUTOMÁTICO

ENERGÍA ÚNICAMENTE CON CONTACTO

Protermia 2.0 solo emite energía cuando el electrodo permanece en contacto con la piel, y deja de emitir cuando no hay contacto con la misma, brindando así un tratamiento 100% real en tiempo y efectividad.

FRECUENCIA

PROTERMIA 2.0 TRABAJA CON 448k Hz

Numerosos estudios científicos han demostrado que a esta frecuencia se consiguen efectos como: la normalización de la función celular, efectos regenerativos, efectos antiinflamatorios y efectos antiálgicos. Además, se ha visto que tiene la capacidad de estimular la proliferación de células madre.

RESULTADOS

MEJORA EN CADA TRATAMIENTO

La diatermia es una técnica avanzada y altamente efectiva que brinda resultados visibles y notables desde el primer momento. Ya sea que estés buscando mejoras estéticas o alivio del dolor, la diatermia superará tus expectativas. Descubre los resultados que Protermia 2.0 ofrece desde la primera sesión de tratamiento.

SEGURIDAD

& CONFORT

La seguridad y comodidad son prioridades fundamentales al utilizar Protermia 2.0 tanto para el operario como para el cliente/paciente. Sus manípulos son ultraligeros, ergonómicos y fáciles de manejar, lo que facilita su uso, trabajando de manera precisa.

VERSATILIDAD

AMPLIA GAMA DE TRATAMIENTOS

Protermia 2.0 esta indicada para diversos tratamientos, desde terapias de rehabilitación y fisioterapia hasta multitud de tratamientos estéticos, aumentando el abanico de clientes potenciales de tu centro.



ESTÉTICA

MEJORA EL TONO DE LA PIEL

PROMUEVE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y ELASTINA

DIATERMIA FACIAL

Gracias a la Protermia 2.0 realizarás tratamientos faciales para mejorar la laxitud de la piel.

Los tratamientos van enfocados a todos los clientes que deseen mejorar el aspecto de su piel, obteniendo un aspecto más joven y firme, así como tratar la grasa subdérmica que favorece la aparición de acné.

La protermia facial se utiliza comúnmente para tratar las arrugas de expresión, líneas periorbitales, ojeras, surcos nasogenianos, arrugas de la comisura de la boca, labios, pómulos o mentón y cuello, obteniendo mejoras visibles desde la primera sesión de piel más firme, elástica, iluminada e hidratada.

DIATERMIA CAPILAR

A nivel capilar estimula la circulación sanguínea, ayudando a dilatar el folículo piloso y favoreciendo la penetración de productos cosméticos, así como una aceleración de los intercambios celulares.



Eliminación de arrugas y líneas de expresión



Consigue luminosidad, tersura y nutrición



Reafirmación de la piel y reducción de manchas



Reduce celulitis y flacidez corporal y facial



SISTEMA RESISTIVO MONOPOLAR

La frecuencia resistiva monopolar en el rostro eleva la temperatura de los tejidos más profundos de la piel ayudando a la estimulación de las células encargadas de producir colágeno. Por lo que se consigue de nuevo firmeza y elasticidad en la piel.

DIATERMIA CORPORAL

A nivel corporal mejora de manera inmediata la apariencia de la piel, combatiendo gradualmente la flacidez, celulitis y adiposidades localizadas.

Resulta muy efectiva para conseguir eliminar la grasa acumulada en las zonas más difíciles y localizadas. Además, desde el modo resistivo de Protermia 2.0, se puede trabajar la grasa visceral gracias a la profundidad que alcanza.

Este tratamiento resulta muy eficaz para la reafirmación y remodelación de zonas como brazos, abdomen, vientre y glúteos, el tratamiento de la flacidez, o la piel de naranja, ayuda a la reducción de estrías y a tratar su apariencia y genera un drenaje linfático para la eliminación de sustancias.

De esta manera, es útil para realizar un Tratamiento DETOX. Por el cual se favorece la detoxificación corporal con el fin de movilizar las sustancias de desecho y ayudar al drenaje ante retención de líquidos o problemas circulatorios.

Por otra parte, resulta útil su versatilidad, ya que se puede usar como medio para dar un masaje relajante, sumando así los efectos propios del masaje relajante, con los que ofrece Protermia 2.0.





FISIOTERAPIA

UN TRATAMIENTO DE ÉXITO EN FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA

La diatermia es una forma de termoterapia endógena que consiste en la transferencia de corriente de alta frecuencia al interior del organismo, provocando el desplazamiento de cargas en los tejidos.

La fricción de estos tejidos genera un calentamiento interno, que permite tratar lesiones musculoesqueléticas con la penetración de calor en los tejidos de unos 8 a 15 cm de profundidad, sin provocar quemaduras en la piel.

EFFECTOS FISIOLÓGICOS

PROTERMIA 2.0

Efecto analgésico | Efecto antiinflamatorio | Efecto relajante .

Inducción de la bioestimulación de los tejidos

Estimulación de la actividad celular, metabólica y de la circulación sanguínea, favoreciendo la oxigenación de los tejidos y la rápida eliminación de catabolitos.

Aceleración de los procesos de reparación del tejido, y por tanto, acelera la cicatrización de los mismos.

A nivel muscular, mejora el desplazamiento entre las distintas capas musculares y mejora el reclutamiento de las fibras.

GRACIAS A ELLO, LA DIATERMIA SE HA CONVERTIDO EN UN TRATAMIENTO DE ÉXITO EN LA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA



INDICACIONES PROTERMIA 2.0

Este equipo permite tratar todo tipo de lesiones musculoesqueléticas, ya que contribuye a relajar la musculatura y aliviar la sensación de dolor.

Algunas de estas lesiones pueden ser:

Roturas fibrilares y distensiones | Tendinitis | Esguinces | Artrosis | Dolor crónico
Bursitis | Edemas traumáticos | Cicatrices | Cervicalgias | Dorsalgias | Lumbalgias

Con Protermia 2.0 podrás tratar a tus pacientes de forma individualizada en función del estado en el que se encuentre su lesión, ya sea una lesión en fase aguda, subaguda o crónica, sacando el máximo rendimiento al equipo.



USO DEPORTIVO

Es de gran utilidad en el tratamiento y prevención de las distintas lesiones derivadas de la práctica deportiva.

Protermia 2.0: la tecnología que optimiza tu recuperación, acelerando el proceso de cicatrización, relajando los tejidos musculares y conectivos, haciendo que disminuya la rigidez.

Además, al reducir la inflamación en las áreas afectadas, facilitando la eliminación de toxinas y desechos metabólicos, no solo permite una recuperación más rápida, sino que también previene futuras lesiones.

Protermia 2.0 es fácil de usar y se adapta a las necesidades de cualquier deportista.

Con Protermia 2.0 puedes trabajar a 3 niveles de potencia, adaptándote a las necesidades de tus clientes o pacientes.



BAJA POTENCIA
Sensación Atérmica

Favorece el drenaje y la reabsorción de edemas y hematomas.

Acción analgésica y antiinflamatoria.




MEDIA POTENCIA
Sensación Termia

Aumento de la temperatura interna del tejido.

Aumento del flujo sanguíneo.

Aumento de la oxigenación y nutrición de los tejidos.

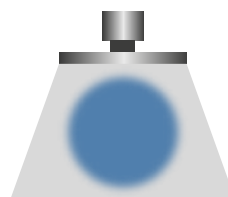

ALTA POTENCIA
Sensación Hipertermia

Trabaja en tejidos profundos o a nivel articular.

MANÍPULOS PROTERMIA 2.0

Está compuesto por dos manípulos diseñados con un agarre ergonómico y cómodo.

Consta de electrodos de distintos diámetros compuestos por un soporte en ABS, 3 resistivos y 4 capacitivos, con el fin de poder adaptarse a las distintas áreas del cuerpo donde se quiera realizar el tratamiento, ya sea facial, corporal o capilar.



MODO RESISTIVO

Estimulación del tejido más duro, como tejido óseo, tendinoso o articulaciones.

Ideal para tratar adiposidades, remodelación corporal y en algunos casos tratamientos faciales.



MODO CAPACITIVO


Estimulación de los tejidos blandos más hidratados.

Tejido muscular, adiposo, vascular y linfático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROTERMIA 2.0

Pantalla	Color táctil 10.2"
Potencia máx.	350 W
Frecuencia	448KHz
Alimentación	100-240Vac / 50-60Hz
Manípulos	1 Mono Cap. + 1 Mono Res.
Electrodos	<ul style="list-style-type: none">· RF Resistiva: 35, 55 y 70 mm diámetro - acero inox.· RF Capacitiva: 30, 40, 55 y 70 mm diámetro - a. inox. + aislado.· Placa de retorno: 15 x 25 cm acero inoxidable.
Control de sesiones	Si.
Control de brillo	Si.
Ajuste de frecuencia automática	Si.
Dimensiones físicas	40 x 30.4 x 16.5 cm
Peso de equipo	5.8 KG

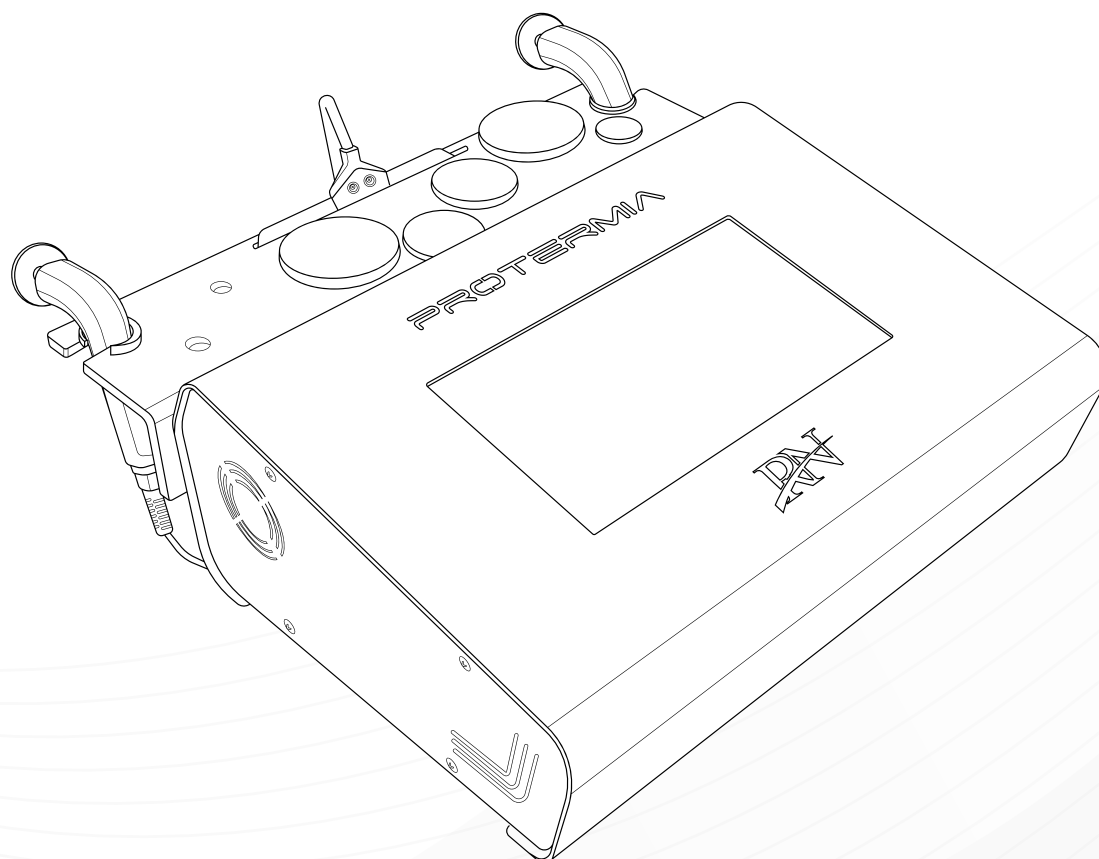

SISTEMA RN TECHNOLOGY

Al realizar la compra del equipo con nuestro sistema RN TECHNOLOGY® recibirás una serie de beneficios: **Asesoramiento, formación, servicio técnico, y un pack publicitario.**



ASESORAMIENTO

Nuestro equipo te ayudará a sacar el máximo rendimiento a tu aparatología. Te ofrecemos el consejo y la asistencia derivados de nuestros años de experiencia en el sector.

Analizamos tus necesidades y te asesoramos en el camino que has de seguir para conseguir tus objetivos.



FORMACIÓN

Destinamos muchos recursos en ofrecer un servicio de calidad, creemos firmemente que la formación es el pilar en el que se sustenta el éxito de cualquier centro de estética.

Nuestro técnico se desplazará a tu centro para darte la formación específica de cada equipo. Además, puntualmente realizamos en nuestras instalaciones sesiones gratuitas para todos nuestros clientes.



SERVICIO TÉCNICO

Sabemos lo importante que es tu trabajo y para ello hemos creado un departamento propio dedicado exclusivamente a dar un servicio rápido y eficaz en la solución de cualquier problema técnico.

Nos aseguramos de que nuestra aparatología tenga la máxima calidad para evitar incidencias futuras.

PACK PUBLICITARIO

Recibirás junto al equipo un pack publicitario personalizado con tu logo y colores corporativos. El conjunto estará compuesto por flyers informativos y roll up del equipo, que te servirá de ayuda para dar visibilidad a tu centro.



!CON PROTERMIA 2.0 AUMENTARÁS TU **FACTURACIÓN**, TU **RENTABILIDAD** Y LA **IMAGEN** DE TU NEGOCIO!

AMORTIZACIÓN

Con estos ejemplos rápidos puedes visualizar de forma sencilla el beneficio que vas a obtener al comprar el equipo Protermia 2.0.


En el primer ejemplo se expone el beneficio que obtendrás al realizar 3 sesiones semanales durante un mes, y en el segundo ejemplo, exponemos el beneficio de 1 bono de 10 sesiones en el período de un año, para un supuesto cliente que adquiriera 5 bonos durante los 12 meses.

3 SESIONES SEMANALES

Precio medio por sesión: **60,00 €**

Facturación mensual: **720,00 €**

**Ejemplo de un cliente que adquiere 3 sesiones semanales.*

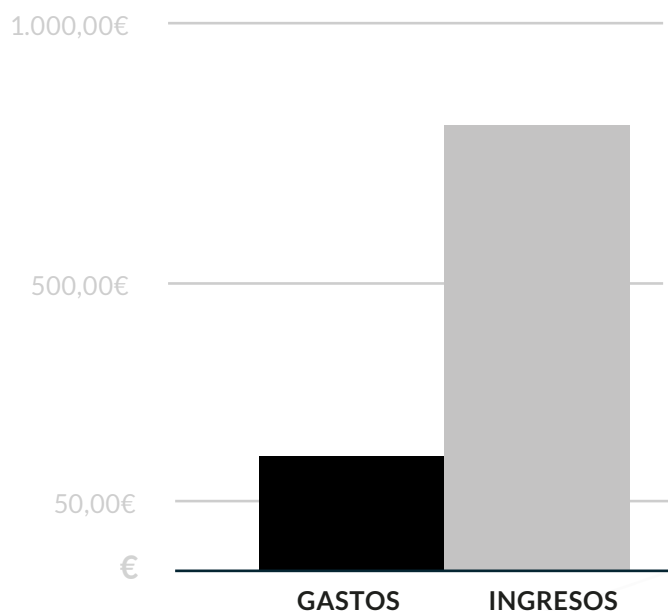


1 BONO 10 SESIONES

Precio medio del bono: **400,00 €**

Facturación anual: **2.000,00 €**

**Ejemplo de un cliente que adquiere 5 bonos anuales.*

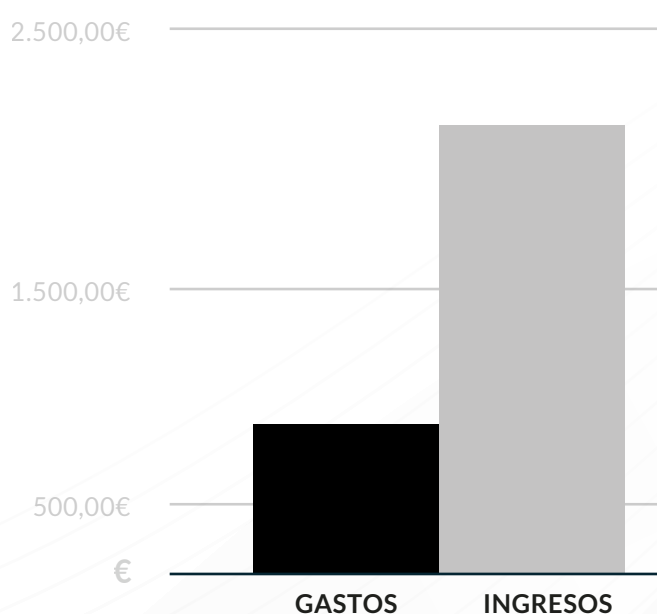

Con estos dos ejemplos vemos claramente que Protermia 2.0 es una apuesta segura para tu centro, el retorno de la inversión se produce de 8 a 10 meses de media.



DK
KI



**“SIEMPRE ESTAMOS CERCA DE TI,
ERES IMPORTANTE PARA
NOSOTROS”**

RN Technology® es referente nacional en la distribución y comercialización de productos para el sector de la estética.

Servicio técnico propio, formación, seguimiento continuo, siempre asegurando un soporte profesional y competente.

Nuestra empresa nace en 2012 para convertirse en referente nacional en la distribución y comercialización de productos para el sector de la estética.

Desde el primer momento ofrecemos una atención personalizada y la mejor relación cliente-empresa.

Contamos con varias delegaciones, además de la sede central. Actualmente, estamos en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias.



RN TECHNOLOGY®

 info@rntech.es

 Pol. Ind. Vicolozano 68 | Ávila